

ヘッドレスト全品

Ver20.04

- MGK5シリーズ……………2～8ページ
タフ型 横の屈曲アーム
- HANEK(ハネック)シリーズ……………9～11ページ
軽荷重型 枕付き MGK5の廉価版
- KHVシリーズ……………12～15ページ
タフ型 縦の屈曲アーム
- CBYZシリーズ……………16～19ページ
タフ型 直動アーム 軽量
- MGK1シリーズ……………20～21ページ
軽荷重型 直動アーム 軽量
- K2Bシリーズ……………22～24ページ
タフ型 ボールジョイントアーム
- 枕……………25ページ
- 義肢装具等完成用部品……………26ページ

取扱店

製造元 川端鉄工所(株)
〒929-0126 石川県能美市山口町木30-2
TEL 0761-21-0993 FAX0761-21-7180
<http://kw-tk.com/> e-mail info@kw-tk.com

ヘッドレストMGK5シリーズ

- ヘッドレストMGK5シリーズはお好みの位置に素早く調整でき、がっちり固定できるタフなヘッドレスト金具です
- アームを横方向に配置した事で左右の調整が得意です
- 頭部が横に傾く場面でも横からサポートできます
- 屈曲アームですので金具の後方への飛び出しが少なく介助者への安全性も向上しました
- 多様な取付け場所に対応できるよう様々な受け金具をご用意しています

●MGK5L, MGK5R
(背板取付受け金具付)

●MGK5L-K, MGK5R-K
(丸パイプ取付受け金具付)
TAISコード00423-000008

●MGK5L-K-90, MGK5R-K-90
(背パイプ取付受け金具付)

●MGK5L-K-360, MGK5R-K-360
(角度可変受け金具付)

●MGK5L-W, MGK5R-W
(丸パイプ取付ダブル受け金具付)

●MGK5L, MGK5R (背板取付受け金具付) 枕は含まれていません



MGK5L



MGK5R

特徴

ヘッドレストMGK5R, MGK5Lは車いすの背板から枕を取付ける金具です(枕は含まれていません)
アームを横方向に配置したことで金具の後方への飛び出しを少なく抑えることができ
介助者の安全と車内など狭い空間での周囲への安全性も向上させました



横からサポート MGK5L



横からサポート MGK5R

横からのサポート

姿勢が左右どちらかに傾いてしまう場合にも威力を発揮します
右からのサポートが必要な時はMGK5Rを、左からサポートが必要な時はMGK5Lを選択ください

MGK5シリーズ

中間関節ダブルクランプ

A関節とB関節をクランプレバー1つで同時に締付けたり緩めたりできますのでアームの前後調整がとても簡単です、しかも強力な固定力を発揮します



定圧ボールジョイント

枕に最も近い関節はボールに予め摩擦抵抗がありますのでクランプレバーを緩めても枕が一気に姿勢を崩すことなく調整が楽にでき強力な固定力を発揮します



定圧ボールジョイント



車いすへの取付けに関して

車いすのバックレストが板でできたものに取り付けできます
板の取付け穴加工はお客様にてお願いします

その他

枕は含まれていません

金具の材質 スチールにメッキ 重さ1kg

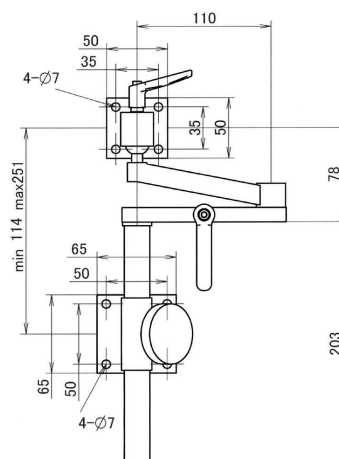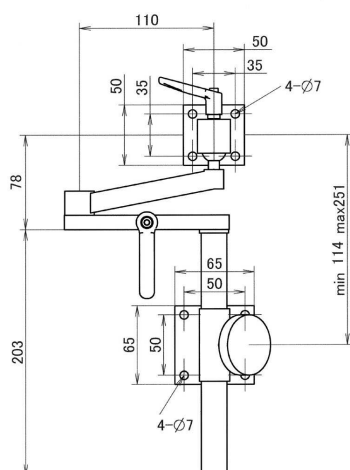


MGK5L

川端鉄工所

MGK5R

川端鉄工所

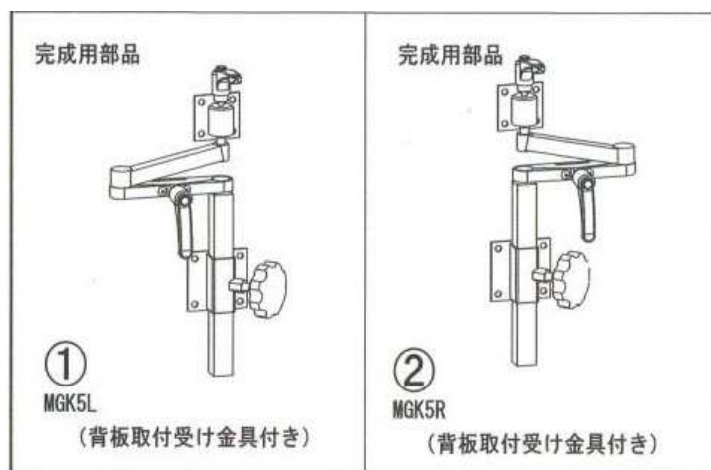

- **MGK5L-K, MGK5R-K** (丸パイプ取付受け金具付) 枕は含まれていません
(TAISコード 00423-000008 このコードは枕を含みます)



MGK5L-K



MGK5R-K

特徴

ヘッドレストMGK5R-Kは車いすの右側の押し手から
ヘッドレストMGK5L-Kは左側の押し手からそれぞれ枕を簡単に取付けできます
アームを横方向に配置したことで金具の後方への飛び出しを少なく抑えることができ
介助者の安全と車内など狭い空間での周囲への安全性も向上させました
また枕を押し手の金具から引き抜くことも出来ますので車に載せる時の高さの心配も不要です
もちろん車いすの折りたたみの機能を損ないません
介助する人、される人双方にやさしいヘッドレスト金具です



横からサポート MGK5L-K



横からサポート MGK5R-K

横からのサポート

姿勢が左右どちらかに傾いてしまう場合にも威力を発揮します
右からのサポートが必要な時はMGK5R-Kを、左からサポートが必要な時はMGK5L-Kを選択ください

中間関節ダブルクランプ

A関節とB関節をクランプレバー1つで同時に締付けたり緩めたりできますので
アームの前後調整がとても簡単です、しかも強力な固定力を発揮します



定圧ボールジョイント

枕に最も近い関節はボールに予め摩擦抵抗がありますので
クランプレバーを緩めても枕が一気に姿勢を崩すことなく
調整が楽にでき強力な固定力を発揮します

定圧ボールジョイント



車いすへの取付けに関して

車いすの座幅 380mm～420mmに対応しています

車いす押し手の丸パイプ直径が19mm用と22mm用をご用意しております（いずれかを選択）


取付けスペースはパイプが真っ直ぐな部分が18mm必要です、車いすの寸法をご確認ください

取付けはボルト2本をレンチで締め付けて取り付けます

その他

枕は含まれていません


金具の材質 スチールにメッキ 重さ1kg

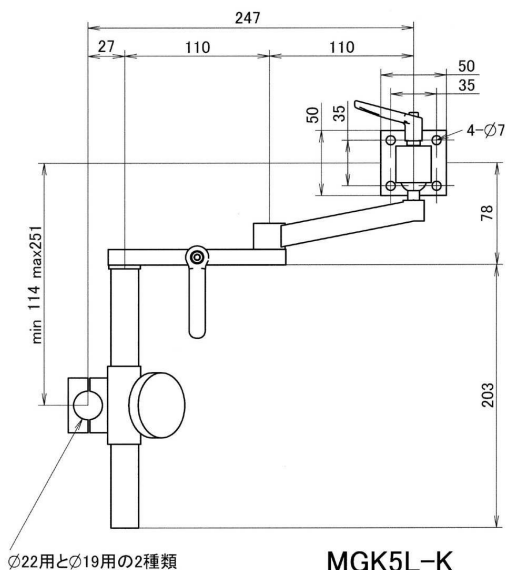

φ22用とφ19用の2種類

MGK5L-K


川端鉄工所

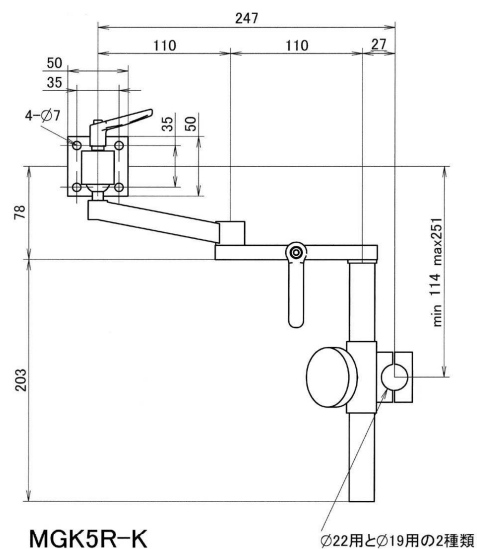

φ22用とφ19用の2種類

MGK5R-K

川端鉄工所

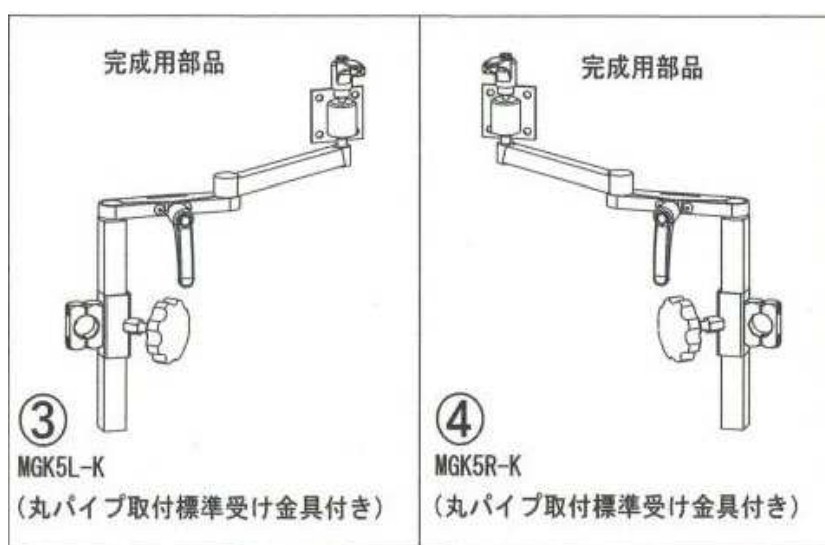

- MGK5L-K-90, MGK5R-K-90 (背パイプ取付受け金具付) 枕は含まれていません



MGK5L-K-90



MGK5R-K-90

特徴

ヘッドレストMGK5R-K-90は車いすの右側の押し手から
 ヘッドレストMGK5L-K-90は左側の押し手からそれぞれ枕を簡単に取付けできます
 アームを横方向に配置したことで金具の後方への飛び出しを少なく抑えることができ
 介助者の安全と車内など狭い空間での周囲への安全性も向上させました
 また枕を押し手の金具から引き抜くことも出来ますので車に載せる時の高さの心配も不要です
 もちろん車いすの折りたたみの機能を損ないません
 介助する人、される人双方にやさしいヘッドレスト金具です

横からのサポート

姿勢が左右どちらかに傾いてしまう場合にも威力を発揮します
 右からのサポートが必要な時はMGK5R-K-90を
 左からサポートが必要な時はMGK5L-K-90を選択ください


中間関節ダブルクランパ、定圧ボールジョイントの詳細はMGK5L-K, MGK5R-Kを参照ください

車いすへの取付けに関して


車いすの座幅 380mm～420mmに対応しています
 車いす押し手の丸パイプ直径が19mm用と22mm用をご用意しております (いずれかを選択)
 取付けスペースはパイプが真っ直ぐな部分が18mm必要です、車いすの寸法をご確認ください
 取付けはボルト2本をレンチで締め付けて取り付けます

その他

枕は含まれていません 金具の材質 スチールにメッキ 重さ1kg

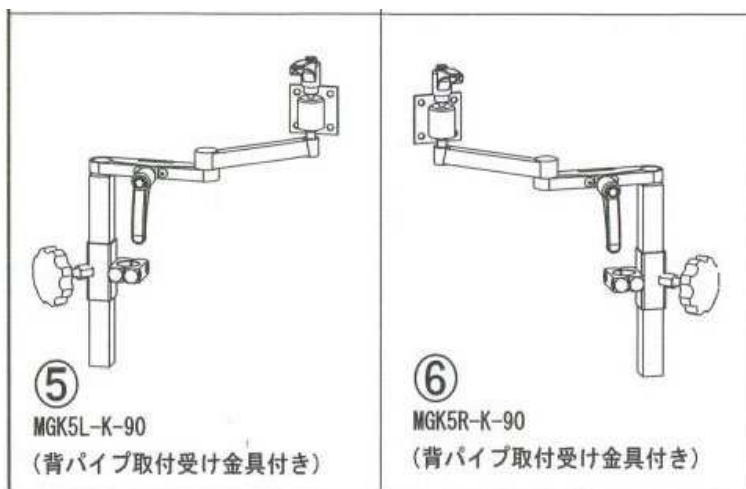

- MGK5L-K-360, MGK5R-K-360 (角度可変受け金具付) 枕は含まれていません

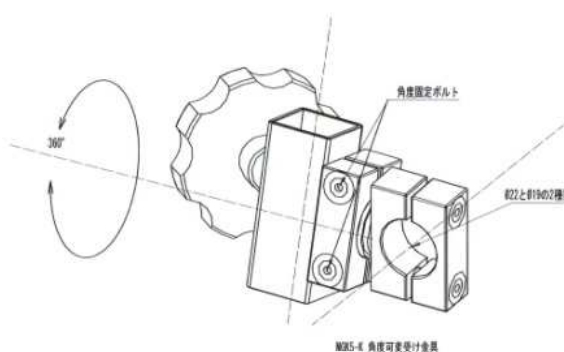

押し手の角度にも背パイプの角度にも合わない場面などフレームパイプの向きに縛られません



MGK5L-K-360



MGK5R-K-360

特徴

ヘッドレストMGK5L-K-360, MGK5R-K-360は車いすのフレームパイプから枕を簡単に取付けできます
360度回転可能な受け金具ですのでフレームパイプの向きに縛られません

横からのサポート

姿勢が左右どちらかに傾いてしまう場合にも威力を発揮します
右からのサポートが必要な時はMGK5R-K-360を
左からサポートが必要な時はMGK5L-K-360を選択ください


中間関節ダブルクランパ、定圧ボールジョイントの詳細はMGK5L-K, MGK5R-Kを参照ください

車いすへの取付けに関して

車いす押し手の丸パイプ直径が19mm用と
22mm用をご用意しております
取付けスペースはパイプが真っ直ぐな部分が
18mm必要です、車いすの寸法をご確認ください

その他

枕は含まれていません
金具の材質 スチールにメッキ 重さ1.17kg

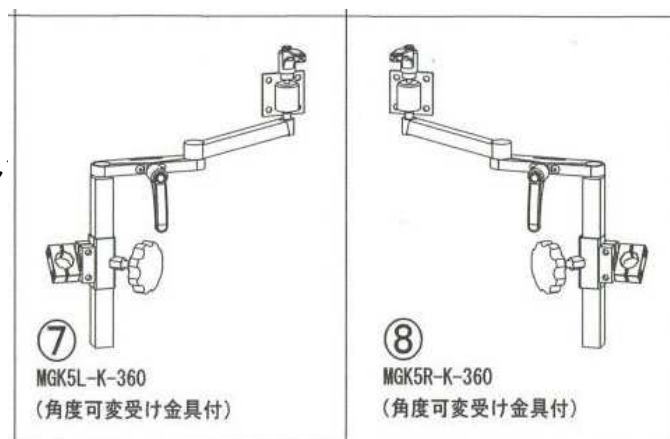

- MGK5L-W, MGK5R-W (丸パイプ取付ダブル受け金具付) 枕は含まれていません



MGK5L-W



MGK5R-W

特徴

ヘッドレスト MGK5L-W, MGK5R-Wは車いすの左右連結パイプに枕を取付ける金具です
 右上図のように枕部が押されると、ヘッドレスト金具に回転力が生じます
 その回転力を車いすフレームのわずか19mmや22mmの直径で保持することは
 受け金具にとって大変厳しい状況です
 この課題をクリアするために、より強力にパイプを保持できるよう
 2個のクランプ金具(ダブル)で掴む方法にすることで強力な保持力を達成しました
 また枕にかかる力が比較的小さい場合は1個のクランプ金具(シングル)でも
 対応できる場合がございます。ご相談ください

注意点

車いすのパイプ直径と受け金具の直径が合いませんと、保持力を発揮できません
 車いすのパイプ直径のご確認をお願いします
 またご希望のパイプ直径を製作いたします、お問い合わせください
 強い緊張のある方にはダブル受け金具でも適していません

横からのサポート

姿勢が左右どちらかに傾いてしまう場合にも威力を発揮します
 右からのサポートが必要な時はMGK5R-Wを
 左からサポートが必要な時はMGK5L-Wを選択ください


中間関節ダブルクランパ、定圧ボールジョイントの詳細はMGK5L-K, MGK5R-Kを参照ください

車いすへの取付けに関して

車いすの左右連結パイプに取り付けできます
 車いす押し手の丸パイプ直径が
 19mm用と22mm用をご用意しております
 対応するパイプ直径は19mmと22mmが
 ありますご指定ください
 ご希望のパイプ直径を製作いたします

その他

枕は含まれていません
 金具の材質 スチールにメッキ 重さ1.15kg

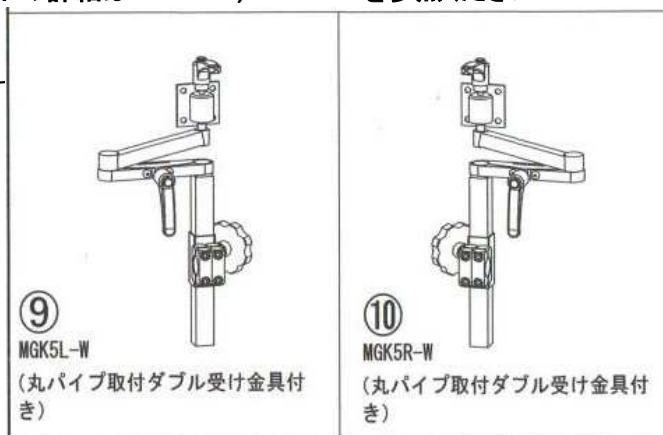

ヘッドレストHANEK (ハネック)シリーズ

- ヘッドレストHANEK(ハネック)シリーズは軽荷重型でシンプルなヘッドレスト金具です。枕付き
- 車いすの左右、どちらの押し手にも取付可能。MGK5L-K, MGK5R-Kの廉価版です
- アームを横方向に配置した事で左右の調整が得意です
- 金具の後方への飛び出しが少なく介助者への安全性も向上しました

●HANEK-Low (ハネック低タイプ)

●HANEK-High (ハネック高タイプ)

●HANEK-Low (ハネック低タイプ)

TAISコード00423-000007

HANEK専用枕付き



右側取付



左側取付



特徴

ヘッドレストハネックシリーズは車いすの右または左の押し手から枕を簡単に取付けできます
シンプル設計ですので調整方法が分かりやすく取り扱いが簡単です
枕に最も近い関節は独自開発のボールジョイントを採用していますので
微妙な位置にぴったり合わせられます

金具の後方への飛び出しを少なく抑えることで介助者の安全と
狭い空間での周囲への安全性も向上させました

車いすの折りたたみの機能を損ないません、また枕を押し手の金具から引き抜くことも出来ますので
車に載せる時の高さの心配も不要です

介助する人、される人双方にやさしいヘッドレストです

車いすへの取付に関して

車いすの座幅380mm～420mmに対応しています

車いす押し手の丸パイプ直径が19mm用と22mm用をご用意しております,(いずれかを選択)

取付けスペースはパイプが真っ直ぐな部分が18mm必要です

車いすの寸法をご確認ください

取付けはボルト2本をレンチで締め付けて取り付けます



右側押し手



左側押し手

枕の高さについて

車いすに座って押し手から頭の高さをご確認ください

ハネック低タイプは押し手から枕の中心までの高さ最低30mm,最高195mm

枕に関して

枕カバーは伸縮性がありカバーのみ着脱可能ですから洗濯も簡単です

材質 ポリエステル



色は黒色

その他

HANEK専用枕付き

スチールにメッキ

重さ1.1kg

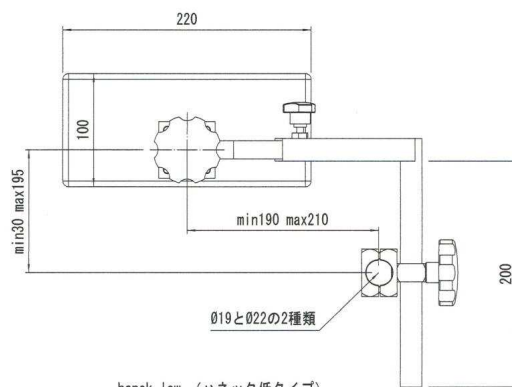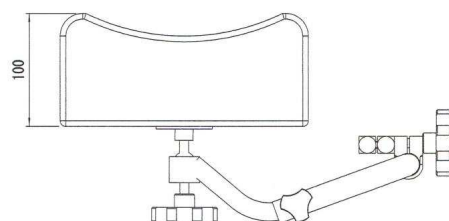

hanek-low (ハネック低タイプ)
川端鉄工所製

●HANEK-High (ハネック高タイプ)

TAISコード00423-000007

HANEK-Low (ハネック低タイプ)との違い

押し手から枕の中心までの高さ 最低30mm,最高330mm (低タイプは最低30mm,最高195mm)

重量1.15kg (低タイプは1.1kg) その他はすべてハネック低タイプと同じです





HANEK専用枕付き

右側取付



左側取付

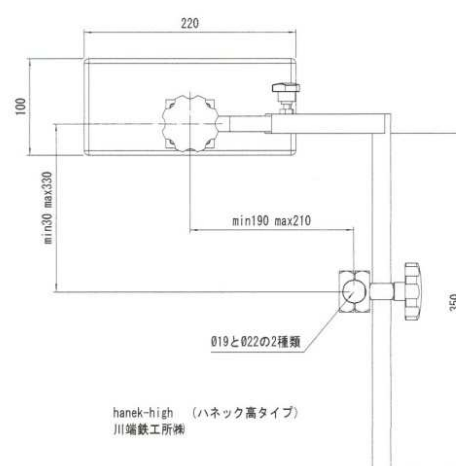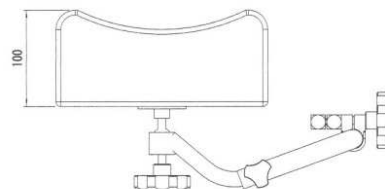

hanek-high (ハネック高タイプ)
川端鉄工所様

取扱店

製造元

川端鉄工所様

〒929-0126 石川県能美市山口町木30-2

TEL 0761-21-0993 FAX0761-21-7180

<http://kw-tk.com/> e-mail info@kw-tk.com

ヘッドレストKHVシリーズ

- ヘッドレストKHVシリーズはお好みの位置に素早く調整でき、がっちり固定できるタフなヘッドレスト金具です
- アームを縦方向に配置した事で前後の調整が得意です
- 屈曲アームですので金具の後方への飛び出しが少なく介助者への安全性も向上しました
- 多様な取付け場所に対応できるように受け金具をご用意しています

●KHV
(背板取付受け金具付)

●KHV-SLD
(背板取付スライド受け金具付)

●KHV-S KHV-W
(丸パイプ取付ダブル受け金具付)

●KHV (背板取付受け金具付) 枕は含まれていません



特徴

ヘッドレスト KHVは車いすの背板から枕を取付ける金具です
アームを縦方向に配置し、前後、上下方向の調整に威力を発揮します

KHVボールジョイント

枕に最も近い関節は独自開発のKHVボールジョイントです
シンプルな構造ながら強力な固定力を発揮します



首振り角 左右各35度



中間関節ダブルクランプ

A関節とB関節をクランプレバー1つで同時に締付けたり
緩めたりできますのでアームの前後調整がとても簡単です
しかも強力な固定力を発揮します
また関節とアームの間隔を空けることで万が一の
指つめに配慮しました





車いすへの取付けに関して

車いすのバックレストが板でできたものに取り付けできます
板の取付け穴加工はお客様にてお願いします

その他

枕は含まれていません

金具の材質 スチールにメッキ、重さ1.15kg

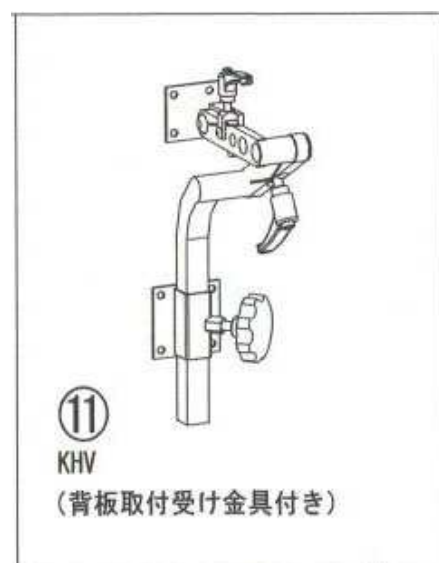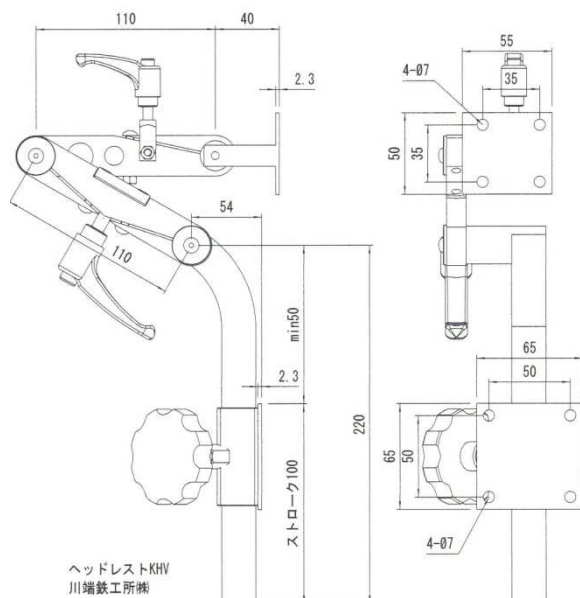**●KHV-SLD (背板取付スライド受け金具付)**

枕は含まれていません

**特徴**

ヘッドレストKHV-SLDは車いすの背板から枕を取付ける金具で左右にスライドできる受け金具付きです
アームを縦方向に配置し、前後、上下方向の調整に加えスライド金具で横の調整も可能にしました



KHVボールジョイント、中間関節ダブルクランプの詳細はKHVを参照ください

車いすへの取付けに関して

車いすのバックレストが板でできたものに取り付けできます
板の取付け穴加工は下図を参考にお客様にてお願いします

その他


金具の材質 スチールにメッキ
重さ1.25kg

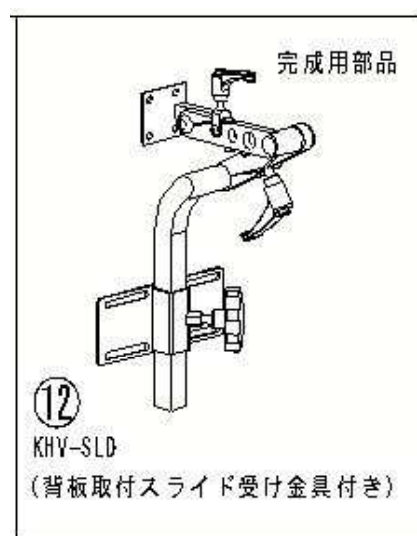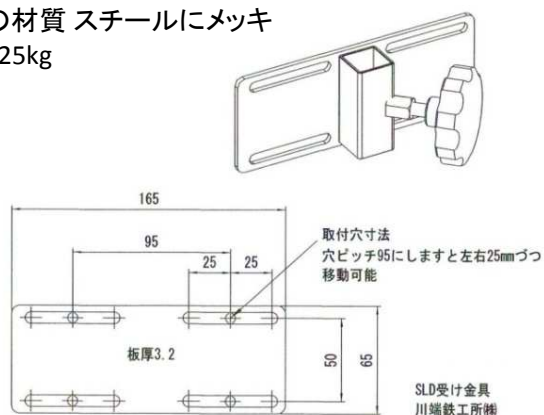

- KHV-S (丸パイプ取付受け金具付)
- KHV-W (丸パイプ取付ダブル受け金具付)



KHV-W

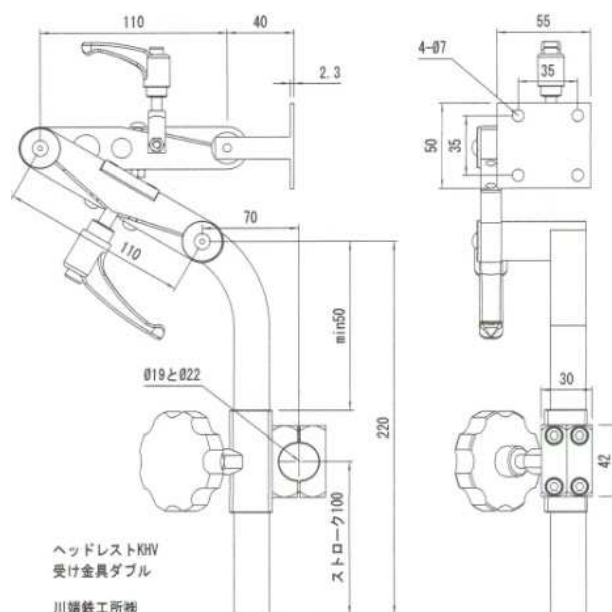

特徴

KHV-SとKHV-Wは車いすの左右連結パイプに
枕を取付ける金具です
アームを縦方向に配置し,前後,上下方向の調整に
威力を発揮します

KHV-Wは図のように枕部が押されると、ヘッドレスト金具に回転力が生じます
その回転力を車いすフレームのわずかに19mmや22mmの
直径で保持することは受け金具にとって大変厳しい状況です

この課題をクリアするために、より強力にパイプを保持できるよう
2個のクランプ金具(ダブル)で掴む方法にすることで
強力な保持力を達成しました

またKHV-Sはクランプ金具が1個(シングル)ですので
加わる力が比較的小さい場合に使用できます

注意点

車いすのパイプ直径と受け金具の直径が合いませんと、
保持力を発揮できません
車いすのパイプ直径のご確認をお願いします
またご希望のパイプ直径に製作いたします
強い緊張のある方には受け金具ダブルでも適していません



KHVボールジョイント、中間関節ダブルクランプの詳細はKHVを参照ください

車いすへの取付けに関して


車いすの左右連結パイプに取り付けできます

対応するパイプ直径は19mmと22mmがありますご指定ください。ご希望のパイプ直径を製作いたします

その他

金具の材質 スチールにメッキ

重さ KHV-S 1.05kg KHV-W 1.25kg

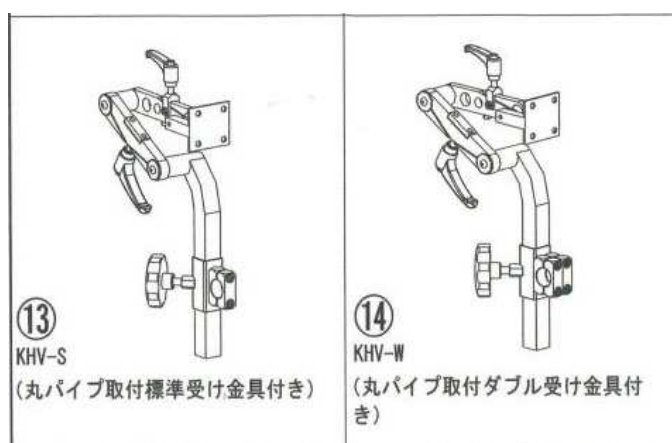

ヘッドレストCBYZシリーズ

- ヘッドレストCBYZシリーズは動きがシンプルな直動アームです
- がっちり固定できるタフなヘッドレスト金具です、タフ型で最軽量
- MGK1の上位機種で、枕取付部に定圧ボールジョイントを採用
- 多様な取付け場所に対応できるように受け金具をご用意しています

●CBYZ
(背板取付受け金具付)

●CBYZ-SLD
(背板取付スライド受け金具付)

●CBYZ-S CBYZ -W
(丸パイプ取付ダブル受け金具付)

●CBYZ (背板取付受け金具付) 枕は含まれていません



特徴

ヘッドレスト CBYZは車いすの背板から枕を取付ける金具です(枕は含まれていません)
直動アームですので、前後、上下方向の調整に威力を発揮します

CBYZ定圧ボールジョイント

枕に最も近い関節はボールに予め摩擦抵抗がありますので
クランプレバーを緩めても枕が一気に姿勢を崩すことなく調整が
楽にでき強力な固定力を発揮します
また枕とボールジョイントの距離を離すことで下向き角を増やしました



首振り角 上に約35度



首振り角 下に約25度

車いすへの取付けに関して

車いすのバックレストが板でできたものに取り付けできます
板の取付け穴加工はお客様にてお願いします



受け金具に関して

受け金具はMGK5やKHVと互換性があります

その他


枕は含まれていません

金具の材質 スチールにメッキ 重さ800g

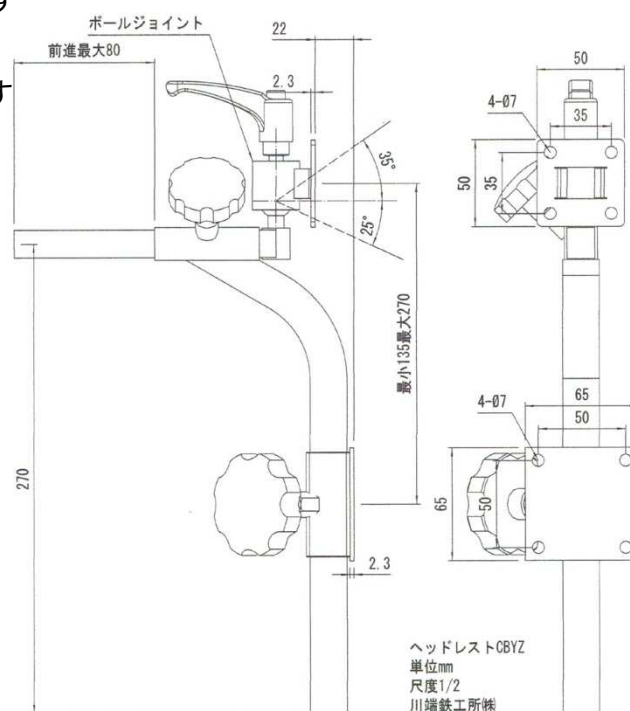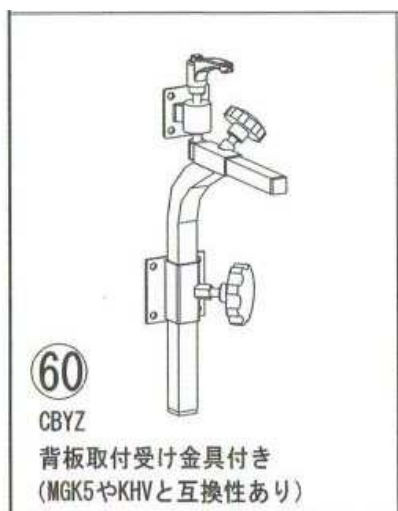

●CBYZ-SLD (背板取付スライド受け金具付)

枕は含まれていません

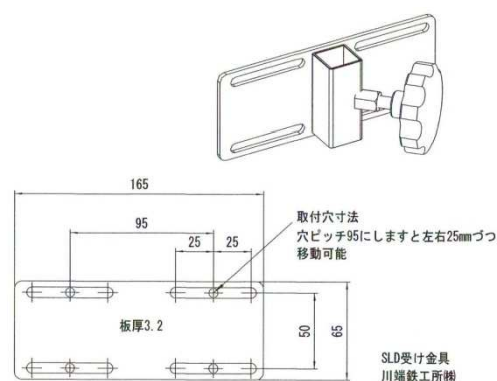

特徴

ヘッドレストCBYZ-SLDは車いすの背板から枕を取付ける金具で左右にスライドできる受け金具付きです
直動アームですので、前後、上下方向の調整に加えスライド金具で横の調整も可能にしました

CBYZ定圧ボールジョイントの詳細はCBYZを参照ください

車いすへの取付けに関して

車いすのバックレストが板でできたものに取り付けできます
板の取付け穴加工は前項図を参考にお客様にてお願いします

受け金具に関して

受け金具はMGK5やKHVと互換性があります

その他

金具の材質 スチールにメッキ
重さ950g



- CBYZ-S (丸パイプ取付受け金具付)

- CBYZ-W (丸パイプ取付ダブル受け金具付)

枕は含まれていません



特徴

CBYZ-SとCBYZ-Wは車いすの左右連結パイプに枕を取付ける金具です
直動アームですので、前後、上下方向の調整に威力を発揮します

CBYZ-Wは図のように枕部が押されますと、ヘッドレスト金具に回転力が生じます
その回転力を車いすフレームのわずかに19mmや22mmの
直径で保持することは受け金具にとって大変厳しい状況です

この課題をクリアするために、より強力にパイプを保持できるよう
2個のクランプ金具(ダブル)で掴む方法にすることで
強力な保持力を達成しました

またCBYZ-Sはクランプ金具が1個(シングル)ですので
加わる力が比較的小さい場合に使用できます

注意点

車いすのパイプ直径と受け金具の直径が合いませんと、
保持力を発揮できません
車いすのパイプ直径のご確認をお願いします
またご希望のパイプ直径に製作いたします
強い緊張のある方には受け金具ダブルでも適していません



CBYZ定圧ボールジョイントの詳細はCBYZを参照ください

車いすへの取付けに関して

車いすの左右連結パイプに取り付けできます

対応するパイプ直径は19mmと22mmがありますご指定ください。ご希望のパイプ直径を製作いたします


その他

枕は含まれていません

金具の材質 スチールにメッキ

重さ CBYZ-S 800g CBYZ-W 950g


完成用部品

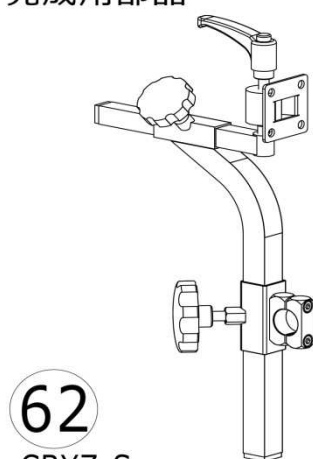

62

CBYZ-S

丸パイプ取付標準受け金具付き
(MGK5やKHVと互換性あり)

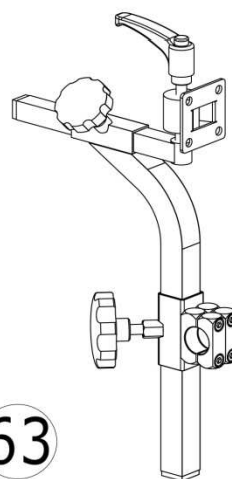

63

CBYZ-W

丸パイプ取付ダブル受け金具付き
(MGK5やKHVと互換性あり)

ヘッドレスト MGK1シリーズ

- ヘッドレストMGK1シリーズは軽荷重型で動きがわかりやすい直動アームです
- 弊社で最も軽量でシンプルな金具です

- MGK1

背板取付受け金具付き

- MGK1-S

丸パイプ取付受け金具付き

- MGK1 (MGK1専用背板取付受け金具付き)
枕は含まれていません



特徴

ヘッドレスト MGK1は軽荷重型です
車いすの背板から枕を取付ける金具です(枕は含まれていません)
前後と仰角は1つのノブで固定しますので、上下ノブと合わせて
固定ノブは2個と少ないです。550gと軽量で価格も控えめです

車いすへの取付けに関して

車いすのバックレストが板でできたものに取り付けできます
板の取付け穴加工はお客様にてお願いします

受け金具に関して


受け金具はMGK1専用のため他のヘッドレスト金具との
互換性はありません

その他

枕は含まれていません
前後バーや上下バーの長さなど変更できます、お問い合わせください
金具の材質 スチールにメッキ、重さ550g



MGK1シリーズ

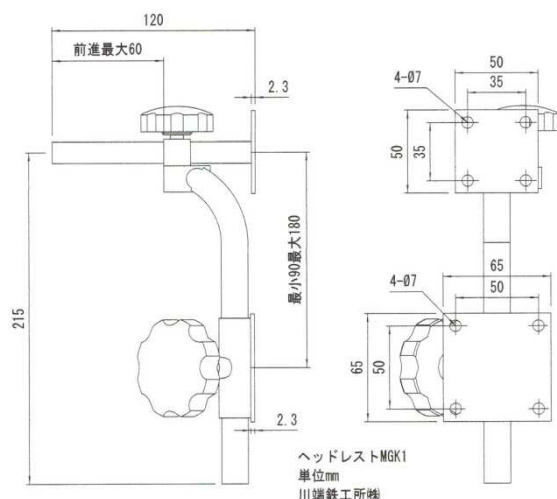

- **MGK1-S** (MGK1専用丸パイプ取付受け金具付き)
枕は含まれていません



特徴

ヘッドレスト MGK1-Sは軽荷重型です
車いすの丸パイプから枕を取付ける金具です(枕は含まれていません)
前後と仰角は1つのノブで固定しますので、上下ノブと合わせて
固定ノブは2個と少ないです。550gと軽量で価格も控えめです

車いすへの取付に関して

車いすのバックレストが板でできたものに取り付けできます
板の取付け穴加工はお客様にてお願いします

受け金具に関して

受け金具はMGK1専用のため他のヘッドレスト金具との
互換性はありません

その他

枕は含まれていません
前後バーや上下バーの長さなど変更できます、お問い合わせください
金具の材質 スチールにメッキ、重さ550g



ヘッドレストK2Bシリーズ

- ヘッドレストK2Bシリーズはお好みの位置に素早く調整でき、がっちり固定できるタフなヘッドレスト金具です
- 2個のボールジョイントを使うことで左右と前後方向を同時に調整します
- 下側のボールジョイントは球径27mmの強力な定圧ボールジョイントです

●K2B (背板取付受け金具付)

●K2B -W (丸パイプ取付ダブル受け金具付)

●K2B (背板取付受け金具付)



前出し

枕は含まれていません



左横



右横

特徴

ヘッドレスト K2Bは車いすの背板から枕を取付ける金具です(枕は含まず)
1本のアームで枕をセットできるシンプルなヘッドレスト金具です
上下に配置した2個のボールジョイントで左右と前後方向を調整し
高さは上下バーで行います

枕側のボールジョイントはMGK5と同じ球径19mmの定圧ボールジョイント
背板側のボールジョイントは球径27mmの強力な定圧ボールジョイントです
首振り角はそれぞれ70度

定圧ボールジョイント 19

定圧ボールジョイント 27



上下バー

K2Bシリーズ

ヘッドレストMGK5やKHVとの違い

アームが1本ですのでMGK5やKHVより調整がより簡単です
反面、可動範囲がMGK5やKHVより少ないです
価格はほぼ同じ



車いすへの取付けに関して

車いすのバックレストが板でできたものに取り付けできます
板の取付け穴加工はお客様にてお願いします

その他

枕は含まれていません

上下バーの長さは切断、延長可能です。お問い合わせください
金具の材質 スチールにメッキ、重さ1.15kg

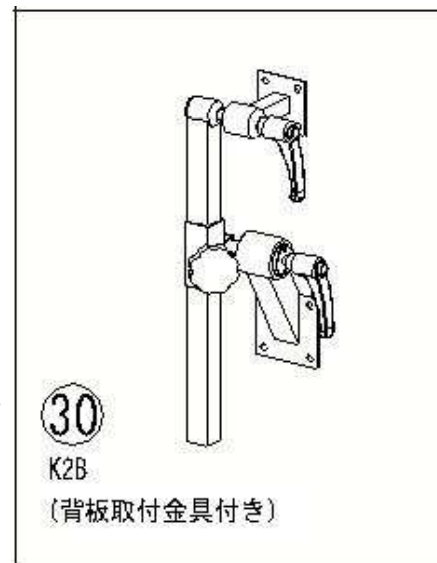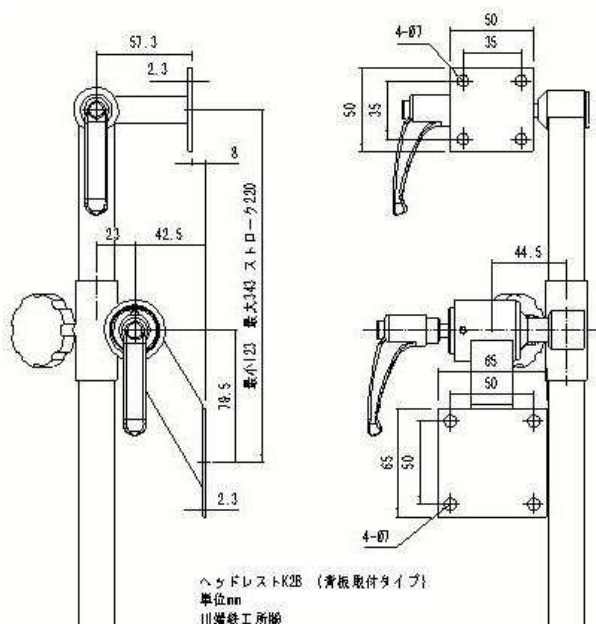

●K2B-W (丸パイプ取付ダブル受け金具付)



特徴

ヘッドレスト K2B-Wは車いすの左右連結パイプに枕を取付ける金具です
1本のアームで枕をセットできるシンプルなヘッドレスト金具です
上下に配置した2個のボールジョイントで左右と前後方向を調整し 高さは上下バーで行います
枕側のボールジョイントはMGK5と同じ球径19mmの定圧ボールジョイント
背板側のボールジョイントは球径27mmの強力な定圧ボールジョイントです
首振り角はそれぞれ70度

ヘッドレストMGK5やKHVとの違い

アームが1本ですのでMGK5やKHVより調整がより簡単です
反面、可動範囲がMGK5やKHVより少ないです
価格はほぼ同じ

車いすへの取付けに関して

K2B-Wは図のように枕部が押されると、ヘッドレスト金具に回転力が生じます
その回転力を車いすフレームのわずか19mmや22mmの直径で保持することは
受け金具にとって大変厳しい状況です


この課題をクリアするために、より強力にパイプを保持できるよう
2個のクランプ金具(ダブル)で掴む方法にすることで強力な保持力を達成しました

注意点

車いすのパイプ直径と受け金具の直径が合いませんと、保持力を発揮できません
車いすのパイプ直径のご確認をお願いします
またご希望のパイプ直径に製作いたします
強い緊張のある方には受け金具ダブルでも適していません

その他

上下バーの長さは切断、延長可能です。お問い合わせください
金具の材質 スチールにメッキ、重さ1.3kg

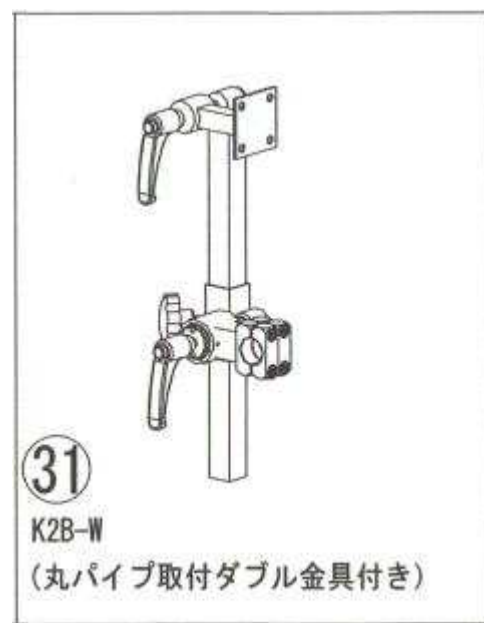

枕

● 浅枕 深枕

彫りの浅いタイプと深いタイプの2種類をご用意しています。色は黒のみ




枕カバー


枕カバーは伸縮性がありカバーのみ着脱可能ですから洗濯も簡単です
材質 ポリエステル



枕の寸法図

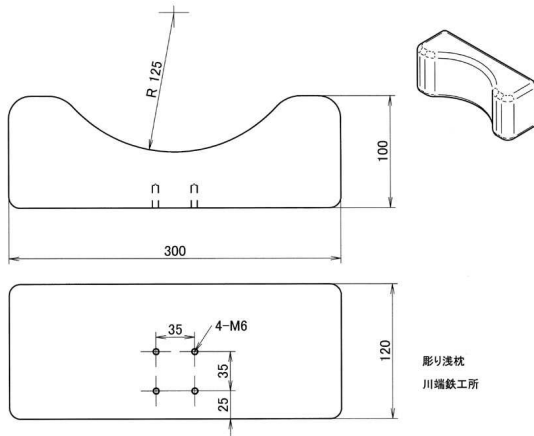


浅枕

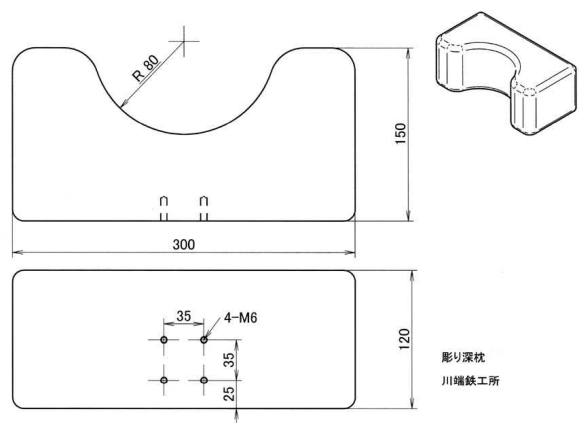


深枕

義肢装具等完成用部品


- MGK5R (MGK5L 勝手違い)
3次元ヘッドレスト、サイドアームタイプ
受け金具付きです

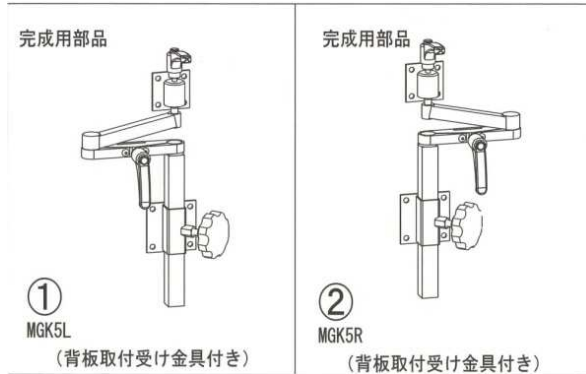

- KHV-SLD ((背板取付スライド受け金具付)
3次元ヘッドレスト、縦アーム型
受け金具付きです

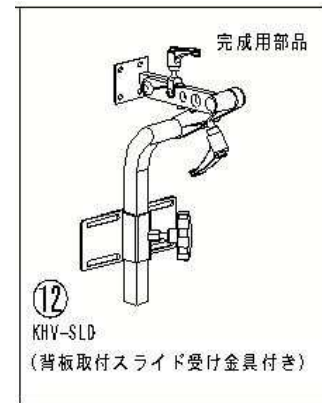

- MGK5R-K (MGK5L-K 勝手違い)
- 3次元ヘッドレスト、サイドアームタイプ、丸パイプ取付型
受け金具付きです

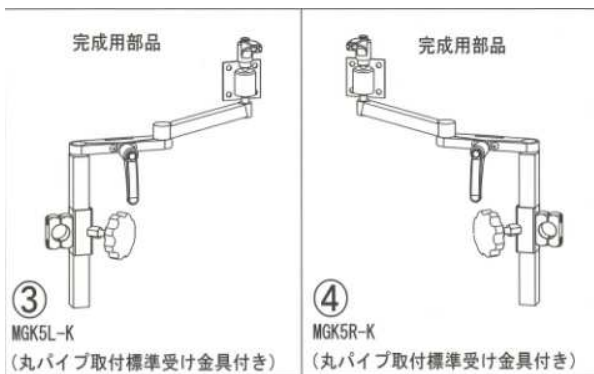

- MGK5-K-UKE

MGK5-K用受け金具

この受け金具は車いすを複数台お持ちの場合、それぞれの車いすに取付けておきヘッドレスト本体を差し替えて 使うためのものです 車いすごとにヘッドレスト一式を用意する必要がないメリットがあります



- CBYZ-S(丸パイプ取付標準受け金具付)
- 3D直動アーム、丸パイプ取付型
受け金具付きです

