

ジョイスティックアーム くるっとカチット

第12回石川県バリアフリー社会推進賞、福祉用具部門、奨励賞受賞

● くるっとカチット 標準タイプ(イマセンEMC)

特徴

電動車いすのジョイスティックを車いすの外側に折り曲げることができる金具です
トランスファー(移乗)が行いやすく、テーブルへもしっかり寄り付くことができます
通常操作位置はガタが限りなく少なくジョイスティックをしっかり保持します
ロック解除レバーを押し倒すとロックが解除され同時に車いすの外側に折り曲げることができます
ジョイスティックを元に位置に戻せば自動でカチットとロックがかかります
通常操作位置以外には位置決め機能はありません



右取付 通常操作位置



右のロック解除(フリー状態)



右のロック解除(折り曲げ限界)



左取付 通常操作位置





右仕様



左仕様



車いすへの取付けに関して

ジョイスティック取付部は現在のところ今仙技術研究所様製電動車いすに対応しています
右仕様, 左仕様がありますご指定ください
オーダー対応いたします、お問い合わせください
材質 ステンレス 重さ600g

● 調整機能付き くるっとカチット(イマセンEMC)

特徴

ジョイスティックをお好みの位置に設定できる、くるっとカチットです
ジョイスティックの位置をもう少し変えられたら楽なのに！という方にお勧めです
ダブルボールジョイントでジョイスティックの位置をラクラク設定でき、その位置を確実に保持します
くるっとカチットですのでトランスファー(移乗)が行いやすく、
テーブルへもしっかり寄り付くことができます
通常操作位置はガタが限りなく少なくジョイスティックをしっかり保持します
ロック解除レバーを押し倒すとロックが解除され同時に車いすの外側に折り曲げることができます
ジョイスティックを元に位置に戻せば自動でカチッとロックがかかります
通常操作位置以外は位置決め機能はありません



くるとカチット



内側や外側にも




上下にも



右仕様 右折り曲げ



右仕様

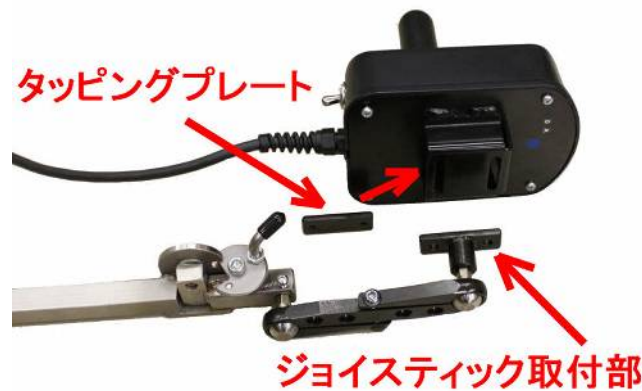

車いすへの取付けに関して

ジョイスティック取付部は現在のところ今仙技術研究所様製電動車いすに対応しています
右仕様, 左仕様がありますご指定ください
オーダー対応いたします、お問い合わせください
材質 ステンレス スチール黒メッキ 重さ750g

● 調整機能付き くるっとカチット(ヤマハJWX-1JWX-1プラス)

特徴

車いす電動化ユニットのジョイスティックに調整機能付きくるっとカチットを取付するものです
 電動化ユニットのジョイスティックは移乗やテーブル等への接近時に
 ジョイスティックをホルダーから抜き差しする必要があります
 そこで、くるっとカチットは抜き差しせずにジョイスティックを車いすの外側に開くことで
 移乗や接近を容易にします。調整機能付きですのでジョイスティックの位置を
 もう少し変えられたら楽なのに！という方にもお勧めです



左取付 操作位置



左取付 開いた状態



右取付 操作位置



右取付 開いた状態

操作説明

ロック解除レバーを押し倒すとロックが解除され同時に車いすの外側に折り曲げることが可能となります
 ジョイスティックを元に位置に戻せば自動でロックがかかりジョイスティックをしっかり保持します
 通常操作位置以外は位置決め機能はありません



各部の名称

ジョイスティックの位置調整はダブルボールジョイントに加え第1と第2ボールジョイントの合計4箇所と上下高さ調整部でお好みの位置にラクラク設定でき、その位置を確実に保持します




車いす取付部

車いすへの取付はV字クランプを採用していますのでパイプ直径16mmから26mmまで対応しております
また第1ボールジョイントと一体ですので縦のパイプでも横のパイプでも斜めのパイプでも取付できます



さらに上下高さ調整部の固定バンドの向きを90度毎に変えられますので車いすからの出っ張りを最小限に抑えることができます

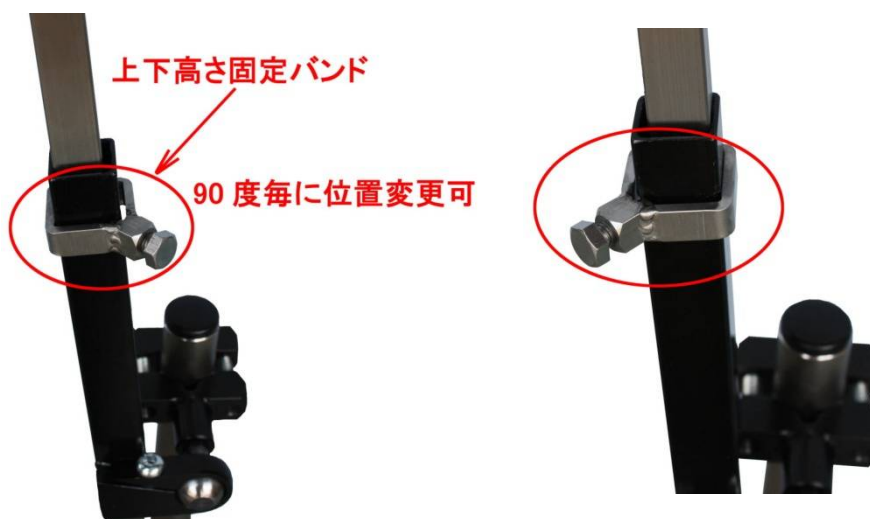

その他

材質、ステンレスとスチールに黒メッキ 重さ1.3kg

取扱店

製造元 川端鉄工所(株)
〒929-0126 石川県能美市山口町木30-2
TEL 0761-21-0993 FAX0761-21-7180
<http://kw-tk.com/> e-mail info@kw-tk.com